



기구 재처리를 최고 시너지를
경험해 보세요

Aniosyme Synergy WD

정교하고 자동화된 기구 재처리용 3중 효소 세척제

Aniosyme Synergy WD는 약알칼리성이며, 정교하고 자동화된 기구 재처리용 액체 세척제입니다. 우수한 세척 성능을 제공하고 특별히 개발한 3중 효소와 규산염이 없는 배합이 최저 농도로 훌륭한 재료 호환성을 제공합니다.

- **강력함** - 매우 강력한 세척력을 입증함
- **효소** - 3중 효소 혼합물 각종 오염물에 효과적임
- **효과** - 모든 수질에 매우 효과적임



Distributed by



www.ecolab.com



Aniosyme Synergy WD

정교하고 자동화된 기구 재처리용 3중 효소 세척제



Aniosyme Synergy WD
5 L 통
주문 코드: 2387.038



Aniosyme Synergy WD
5 L 통
주문 코드: 2387.015

강력함

우수한 재료 호환성으로 5분부터 효과가 입증되었습니다.

효소

특별히 개발한 규산염이 없는 3중 효소 배합으로 유연한 용량을 사용하여 각종 오염물 제거.

효과

농도 0,2%~0,5%에서 입증된 최저 농도 효율은 우수한 세척 성능을 제공합니다.

물리화학적 데이터

- 밀도 온도 20°C 1,16g/ml
- pH 값* (농축물) 20°C 8,5
- pH 범위* (용액, 2~5mL/L) 20°C 9,6~10,3
- 전도성 20°C 0,30~0,64mS/cm
(용액, 탈이온수에서 2~5mL/L)

* 항상 온도 보상 기능이 있는 pH 미터기를 사용하여 작동 조건에서 pH 값 측정

주문 정보

제품	포장 단위	주문 코드
Aniosyme Synergy WD	2 x 5 L 캔	2387.038
Aniosyme Synergy WD	2 x 5 L 캔	2387.015
Aniosyme Synergy WD	1 x 10 L 캔	2387.024
Aniosyme Synergy WD	1 x 20 L 캔	2387.271
Aniosyme Synergy WD	1 x 25 L 캔	2387.018
Aniosyme Synergy WD	1 x 200 L 드럼	2387.331



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributed by
한국메덴트(주)
경기도 하남시 서하남로95번길 37
Tel: 02-423-5053



응용 분야

기구용 3중 효소 세제 수술 및 의료 장비, 자동 세척기 및 세척 터널에서 사용하는 의료기기의 세척.

사용법

- 전문가용 농축액
- 희석 농도 0,2~0,5% 범위에서 자동 세척기 및 세척 터널용으로 사용합니다
- 5분부터 효과를 볼 수 있습니다
- 오염의 정도와 사용한 세척 방법에 따라 농도, 접촉 시간 및 희석한 물의 온도에 적용합니다
- 최고 온도: 60°C

성분

거품 억제 효과가 있는 비이온과 양이온 계면 활성제, 이온붕쇄제(킬레이트제), 효소 혼합물(프로테아제, 리파아제 및 아밀라아제), 부형제.

보관

위험 - 사용상 주의 사항을 지켜주십시오 (화학 제품의 분류 및 표기와 관련하여 시행 중인 유럽 규정에 따라 작성된 주의 사항). 보관: 온도 +5°C~+25°C 범위에서 보관.

증명서

요구 시 증명서를 제공해드립니다.



전문가 전용.